

GC NEW METAL STRIPS

НОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТРИПСЫ ШТРИПСЫ ДЛЯ ФИНИРОВАНИЯ

Только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Оконтуривание апроксимальных поверхностей пломб.
2. Разделение зубов.
3. Препарирование опорных зубов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- a) Подберите полосу нужной зернистости.
- b) Вставьте полосу в межзубное пространство.
- c) С лёгким нажимом двигайте полосу вперёд и назад.

Примечания

1. NEW METAL STRIPS обладают острыми краями. При работе с ними надевайте защитные перчатки и внимательно следите за тем, чтобы не повредить ткани полости рта пациента, кожу лица и т.п.
2. Штрипсы могут использоваться повторно. Очищайте их с помощью ультразвуковой установки, либо обрабатывайте пламенем и стерилизуйте путем автоклавирования или химическими средствами.

ТИПЫ

1. No200 (красные); No300 (голубые); No600 (зелёные); No1000 (жёлтые).
2. Ширина – А (2.6 мм); В (3.3 мм); С (4.0 мм); Длина – 133 мм.
3. Толщина – No200 (140 мкм); No300 (90 мкм); No600 (70 мкм); No1000 (50 мкм).

УПАКОВКА

1. Одинаковая зернистость – Упаковка 12 штрипсов (по 4 шт каждой ширины, А, В и С)
2. Одинаковая зернистость – Упаковка 12 штрипсов (12 шт – все одинаковой ширины)
3. Ассортиментная упаковка – Упаковка 12 штрипсов (по 1 каждой ширины и каждой зернистости)