

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
лака стоматологического фторирующего однокомпонентного
противокариесного противоболевого
«БЕЛАК®-F»
по ТУ 9391-012-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Лак стоматологический фторирующий однокомпонентный противокариесный противоболевой "Белак-F" (далее по тексту – материал "Белак-F") применяется для профилактики кариеса зубов у детей и подростков, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал "Белак-F" – белый однокомпонентный фторирующий лак. В его состав входят растворитель, пленкообразователь, калий фтористый. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, предохраняют зубы от развития кариеса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

После удаления зубного налета поверхность зубов протереть ватным тампоном, изолировать зубы при помощи ватных валиков, просушить воздухом. Затем с помощью аппликатора нанести лак на поверхность зубов и просушить воздушным потоком 3-5 минут. Образовавшаяся пленка сохраняется на зубах в течение 10-12 часов.

ВНИМАНИЕ: *Не допускать попадания препарата на слизистую.*

Во избежание преждевременного удаления пленки, рекомендуется в течение 12 часов не принимать твердую пищу и не чистить зубы. Пленка легко удаляется зубной щеткой.

Для профилактики кариеса у школьников покрывают лаком все зубы: при I степени активности кариеса - 2 раза в год, при II степени - 4 раза в год, при III степени - 6 раз в год.

В качестве лечебного средства при кариесе, гипоплазии эмали, гиперестезии твердых тканей зубов, "Белак-F" применяют курсом до 4 аппликаций с интервалом 3 дня.

ВНИМАНИЕ: *При хранении лак может расслаиваться, что не сказывается на качестве материала. Перед применением необходимо встряхнуть флакон в течение 20-30 секунд, гомогенность жидкости восстановится.*

ФОРМА ВЫПУСКА

Лак (флакон)	- 25 мл
Аппликаторы	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск материала "Белак-F" другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в плотно закрытых флаконах в защищенном от света месте при температуре от **+5°C до +25°C вдали от огня.**

Срок годности - **3 года.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°C до +30°C.**

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала "Белак-Ф" и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07667 от 26.09.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.