

+
WE
KNOW
ENDO.



ProTaper Next®
Гибкий подход
К ЭНДОДОНТИИ

 Dentsply
Sirona
Endodontics

**Философия ProTaper®
остается неизменной**

Одна последовательность
инструментов для всех
клинических случаев

Переменная конусность для
оптимизированной техники
crown-down

Общепринятые апикальные
диаметры инструментов

Новое поколение золотого стандарта в ЭНДОДОНТИИ

Система ProTaper Next® – следующее поколение системы ProTaper® Universal, которая является золотым стандартом эндодонтического лечения в течение многих лет. Это эффективная эндодонтическая система для врачей, нуждающихся в комплексном и функциональном решении, которое подходит для большинства клинических случаев.



2001 ProTaper®

Новое поколение инструментов...

... подходит для большинства клинических случаев, включая более сложные ситуации*

Protaper Next® подходит для более узких и изогнутых корневых каналов в отличие от обычных никель-титановых систем. Это достигается за счет двух особенностей: повышенной гибкости инструмента и уникального волнообразного движения.

... надежнее*

Риск перелома инструмента значительно снижен, вместе с тем файл гораздо лучше сохраняет анатомию канала. Безопасность пациента и прочность инструмента являются основополагающими принципами эндодонтического лечения.

... быстрее*

Меньшее количество этапов в протоколе и высокая режущая эффективность инструмента минимизирует время обработки канала. Сэкономленное время может быть использовано стоматологом, например, для проведения более качественной ирригации.

... меньше дентинных опилок


Инструмент движется волнообразно в канале раскачивающимися движениями. Это достигается благодаря смещенному от центра прямоугольному сечению. Такая геометрия файла увеличивает пространство для дентинных опилок.



ProTaper® Universal



ProTaper Next®

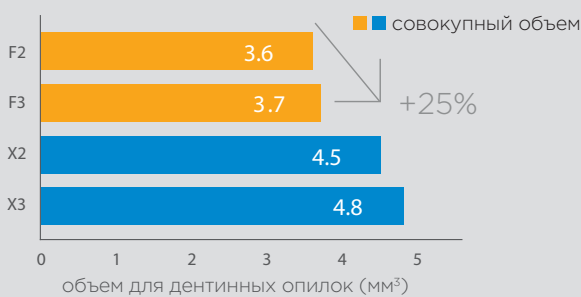

Внутренние данные

Технология нового поколения...

«Волнообразное» вращение

Инновация ProTaper Next® - поперечное сечение, смещенное от центра.

В результате, файл лучше центруется в корневом канале, освобождая пространство для дентинных опилок.

M-WIRE®

Никель-титановый сплав M-Wire® увеличивает гибкость инструментов сохраняя при этом их режущую эффективность. Данная технология термической обработки запатентована компанией Dentsply Sirona.


m-wire®
nickel titanium



2006 ProTaper® Universal

2013 ProTaper Next®

* Результаты внутренних лабораторных испытаний

СОЗДАНИЕ
«КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ»

ФОРМИРОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



PG

X1

X2

X3

X4

X5


ProGlider®

ProTaper Next®

Клинические случаи



До
Первый левый премоляр
верхней челюсти.
Девитальная пульпа
привела к образованию
очага поражения.

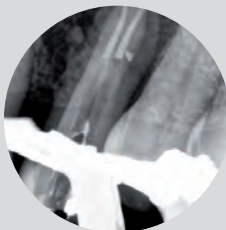

После
Рентгенограмма на этапе
обтурации down rack,
демонстрирующая 2
канала и 5 запечатанных
верхушечных
отверстий. ProTaper
Next® обеспечивает
предсказуемое
препарирование
для надежной 3D
обтурации независимо от
используемой техники.

Снимки предоставлены
Др. Джоном Вестом





Др. Пит ван дер Вивер

«Система ProTaper Next® позволяет стоматологам использовать всего два файла в большинстве клинических случаев. Результаты невероятны. Вы заметите резкое сокращение времени на препарирование, а также достигнете анатомической формы канала для оптимальной ирригации и трехмерной obturation. Это новое слово для каждого врача, который хочет достичь самых высоких результатов в эндодонтии.»



Др. Клифф Раддл

«ProTaper Next® претворяет в жизнь три священных принципа формирования каналов, а именно: безопасность, эффективность и простота.»

Пропуск в мир новых медицинских стандартов

Dentsply Sirona Endodontics повышает стандарты эндодонтического лечения, выпуская инструменты ProTaper Next® в стерилизованных блистерах. Стерильный инструмент рекомендован для лечения одного пациента. Стоматологу достаточно 2 или 3 файлов Protaper Next® в большинстве клинических случаев, тогда как прежде использовалось до 5 инструментов. Сокращение количества используемых файлов делает применение одноразовых инструментов менее затратным.



Эргономика

Нет необходимости в дополнительной обработке и хранении инструментов ProTaper Next.



Сниженный риск поломки инструмента

Процедура лечения становится более безопасной при использовании одноразовых файлов. При многократном использовании эндодонтические инструменты становятся более подвержены циклической усталости и проявляют другие признаки износа. Использование одноразовых инструментов сокращает риск поломки из-за накопленной циклической усталости.



Высокая режущая эффективность

Исследования показывают, что многократное использование инструментов напрямую влияет на их режущую эффективность, усложняя работу врача и снижая комфорт пациента. Используя систему ProTaper Next® вы не столкнетесь с такой проблемой, поскольку он предназначен для разового использования.



Отсутствует риск перекрестного заражения

Исследования показывают, что независимо от того, насколько хорошо был стерилизован инструмент, на его поверхности зачастую остаются бактерии. Повторное использование такого инструмента увеличивает риск перекрестного заражения для каждого следующего пациента.

ProTaper Next®

Готовое комплексное решение для ЭНДОДОНТИИ

Protaper Next® – система, включающая в себя все этапы эндодонтического лечения.

ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛА



Формирующие инструменты

Инструменты ProTaper Next® подходят для большинства клинических случаев



Инструменты для создания «ковровой дорожки»

Рекомендованные инструменты для создания «ковровой дорожки» - Proglider®



Эндодонтический мотор

Мотор X-Smart Plus™ - это всё, что вы любили в X-Smart™, только со знаком плюс!

Этот мотор отличает компактность и эргономичность. Лёгкая рукоятка наконечника с миниатюрной головкой, отсутствие напольной педали и возможность работы от аккумулятора позволят вам чувствовать себя более комфортно при выполнении операции и полностью сконцентрировать свое внимание на пациенте.

ОБТУРАЦИЯ



GuttaCore® для ProTaper Next® - первый obturator на носителе из поперечно-сшитой гуттаперчей.



Печь ThermaPrep® 2 предназначена для нагрева obturаторов GuttaCore®, Thermafil®, ProTaper® Universal и WaveOne®.

ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ



Для случаев перелечивания рекомендуются инструменты ProTaper® Universal серии D. Они специально разработаны для простой распломбировки каналов.

ProTaper Next® Комплексное решение



NiTi инструменты

ProTaper Next® X1



A080022100103	File Ster. 21mm	017 .04	6x
A080022500103	File Ster. 25mm	017 .04	6x
A080023100103	File Ster. 31mm	017 .04	6x
A080322100103	File Ster. 21mm	017 .04	3x
A080322500103	File Ster. 25mm	017 .04	3x
A080323100103	File Ster. 31mm	017 .04	3x

ProTaper Next® X5



A080022100503	File Ster. 21mm	050 .06	6x
A080022500503	File Ster. 25mm	050 .06	6x
A080023100503	File Ster. 31mm	050 .06	6x
A080322100503	File Ster. 21mm	050 .06	3x
A080322500503	File Ster. 25mm	050 .06	3x
A080323100503	File Ster. 31mm	050 .06	3x

ProTaper Next® X2



A080022100203	File Ster. 21mm	025 .06	6x
A080022500203	File Ster. 25mm	025 .06	6x
A080023100203	File Ster. 31mm	025 .06	6x
A080322100203	File Ster. 21mm	025 .06	3x
A080322500203	File Ster. 25mm	025 .06	3x
A080323100203	File Ster. 31mm	025 .06	3x

ProTaper Next® assortment X1 - X3



A08002219A003	Ass. File Ster.21	X1 - X3	6x
A08002259A003	Ass. File Ster.25	X1 - X3	6x
A08002319A003	Ass. File Ster.31	X1 - X3	6x
A08032219A003	Ass. File Ster.21	X1 - X3	3x
A08032259A003	Ass. File Ster.25	X1 - X3	3x
A08032319A003	Ass. File Ster.31	X1 - X3	3x

ProTaper Next® X3



A080022100303	File Ster. 21mm	030 .07	6x
A080022500303	File Ster. 25mm	030 .07	6x
A080023100303	File Ster. 31mm	030 .07	6x
A080322100303	File Ster. 21mm	030 .07	3x
A080322500303	File Ster. 25mm	030 .07	3x
A080323100303	File Ster. 31mm	030 .07	3x

ProGlider®



A092622100103	File Ster. 21mm	016 .02	6x
A092622500103	File Ster. 25mm	016 .02	6x
A092623100103	File Ster. 31mm	016 .02	6x
A092322100103	File Ster. 21mm	016 .02	3x
A092322500103	File Ster. 25mm	016 .02	3x
A092323100103	File Ster. 31mm	016 .02	3x

ProTaper Next® X4



A080022100403	File Ster. 21mm	040 .06	6x
A080022500403	File Ster. 25mm	040 .06	6x
A080023100403	File Ster. 31mm	040 .06	6x
A080322100403	File Ster. 21mm	040 .06	3x
A080322500403	File Ster. 25mm	040 .06	3x
A080323100403	File Ster. 31mm	040 .06	3x

ProTaper® Universal retreatment D1 - D3



A141021600103	File Ster.D1	030 .09	6x
A141021800103	File Ster.D2	025 .08	6x
A141022200103	File Ster.D3	020 .07	6x
A141220090003	Ass. File Ster.	D1- D3	6x

Эндодонтический мотор

A1032 000 00 000 X-Smart™ Plus





Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3
CH-1338 Ballaigues
Switzerland
www.dentsplymaillefer.com

Dentsply Sirona, OOO «Дентсплай Сирона»
115432, Москва, пр-т Андропова д. 18, корп. 6
«Немецкий центр промышленности и торговли»,
этаж 9, оф. 9-01
Тел.: (495) 725-10-87
Факс: (495) 725-10-86
www.dentsplycis.com

