

Уникальная система изоляции рабочего поля **OptiDam™**



Fixafloss™



SoftClamp™



Наложение OptiDam™ на фронтальные зубы:



1. Срежьте цилиндрические выступы на OptiDam™, соответствующие изолируемым зубам, оставив примерно 1 мм от основания (для инверсии в зубодесневую борозду).



2. Наложите OptiDam™ Anterior, расположив «+» на верхней челюсти, а «-» на нижней челюсти. «+» используется как центр коффердама.




3. Используйте флосс для протягивания коффердама через межзубной контакт. Начинайте с центральных резцов.



4. Натяните коффердам на остальные зубы, требующие изоляции.

Почему выбирают OptiDam™?

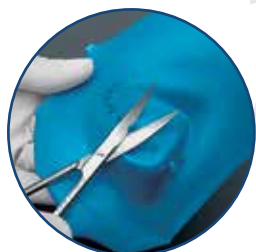


1 Простота в использовании

Не нужен пробойник
и шаблон



3 Эффективность

Улучшение обзора
и облегчение доступа
к рабочему полю

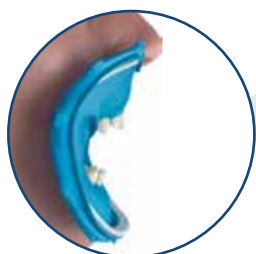

2 Максимальный комфорт

Анатомическая форма
рамки позволяет вашим
пациентам дышать
свободно



4 Практичность

Минимальный риск
разрывов благодаря
прочности латексных
платков

Рекомендации:

Выполняйте инверсию платка в зубодесневую борозду для более плотного прилегания платка к шейке зуба

Используйте коффердам **на эндодонтическом приеме** для идеальной изоляции от агрессивных антисептиков и сохранения рабочего поля чистым

Используйте **технику Split Dam** для изоляции группы зубов как на терапевтическом, так и на ортопедическом приеме

Наложение OptiDam™ на жевательные зубы:



1. Срежьте цилиндрические выступы на OptiDam™, соответствующие изолируемым зубам, оставив примерно 1 мм от основания (для инверсии в зубодесневую борозду).



2. Установите кламмер SoftClamp™ с платком OptiDam™ на зуб.



3. Разместите коффердам под «крылья» кламмера SoftClamp™.



4. Натяните коффердам на остальные зубы, требующие изоляции.