



ARKONA

ETCHMASTER

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТРАВОЧНЫЙ ГЕЛЬ
ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 36%

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В набор входит шприц, наполненный $\pm 2,6$ г (2 мл), $\pm 6,5$ г (5 мл), ± 13 г (10 мл) или ± 60 г (50 мл) препарата гелеобразной консистенции (действующим веществом является 36% ортофосфорная кислота) + наконечники ETCHMASTER TIPS.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Протравливание эмали зубов для улучшения адгезии композитных стоматологических пломб и реставраций. Предотвращает образование краевой щели в области композитной реставрации.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

- пломбировке композитами химического и светового отверждения,
- герметизации фиссур,
- протравливании эмали опорных зубов перед началом фиксации постоянных ортодонтических аппаратов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

На тщательно очищенную и высушенную поверхность эмали наложить тонкий слой геля ETCHMASTER. Оставить на около 30 секунд. Промыть сильной струёй воды. Тщательно высушить до обретения эмалью матово-белого цвета, но не пересушивать эмаль зуба.

Не протравливать дольше 60 с.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время протравливания рекомендуется использовать защитные очки для пациента и медперсонала.

Избегать попадания препарата в глаза и на мягкие ткани ротовой полости, а также кожу лица и рук медперсонала и пациента.

В случае контакта смыть большим количеством воды.

В случае попадания в глаза обратиться к специалисту.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 3-28°C. Беречь от детей.

ГАРАНТИЯ

Фирма ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретённые покупателем или возвращает ему их стоимость. ARKONA не отвечает за ущерб, вызванный неправильным хранением или не соответствующим инструкции применением препарата.

Инструкция действительна с 29.02.2021



ARKONA

ARKONA

ARKONA Laboratorium Farmakologii
Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk,
Nasutow 99C, 21-025 Niemce, Poland
www.arkonadent.ru

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «АРКОМ», 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, лит. А, пом. 14Н
Тел. 8 800 700-25-25, www.arkom-org.com