



### Neo Spectra™ ST Effects


Простое решение для реставраций фронтальной группы зубов



### Neo Spectra™ ST

Подходит для большинства клинических случаев в вашей практике

# Простота в эстетике с композитными материалами Neo Spectra™ ST



### Neo Spectra™ ST flow

Универсальный текучий композит для любых реставраций, в том числе эстетических

# Десятилетия инноваций в разработке композитных материалов позволили нам понять, что важно для стоматологов



Манипуляционные характеристики



Эстетичность



Долговечность


## Технология наполнителя SphereTEC®

Увеличенная частица наполнителя SphereTEC® диаметром 15 мкм

Благодаря технологии наполнителя SphereTEC® композитные материалы Neo Spectra™ ST обладают рядом существенных преимуществ

Ключевые преимущества композитных материалов Neo Spectra™ ST стали возможными благодаря технологии наполнителя SphereTEC®. Морфология, распределение размера частиц и микроструктура поверхности наполнителя SphereTEC® обеспечивают именно те преимущества, которые имеют для стоматологов наибольшее значение.


# СФЕРИЧЕСКИЕ

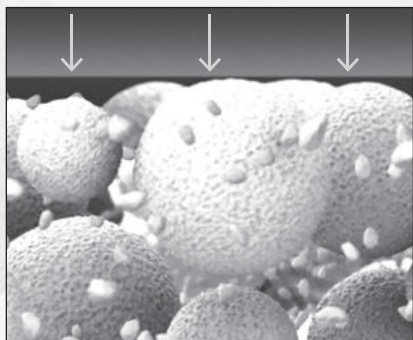

## Улучшенные манипуляционные характеристики

**Простота работы с материалом очень важна при выполнении реставрации.** Сферическая форма и размер частиц наполнителя SphereTEC®, а также их распределение в матрице композита создают эффект «шарикоподшипника», который обеспечивает отличную адаптацию и моделируемость. Частицы SphereTEC® могут связывать большее количество полимера по сравнению с частицами обычного наполнителя – это устраняет липкость материала к инструменту.


# МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ

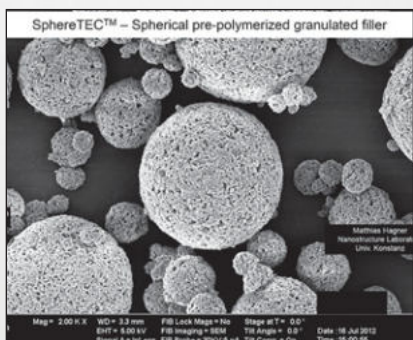

## Легко достижимая эстетичность

**Натуральная красота должна быть проста в воссоздании.** Уникальный наполнитель SphereTEC® гарантирует превосходный эффект хамелеона благодаря балансу прозрачности, поглощения света и его рассеивания. Микроструктура наполнителя обеспечивает быструю полировку композита до выраженного блеска.

# ЧАСТИЦЫ

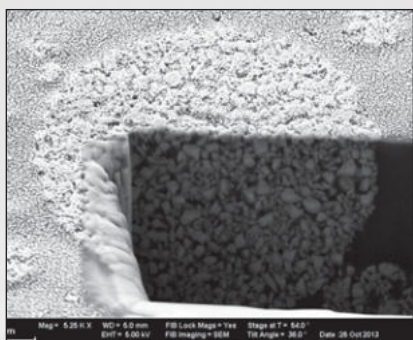

## Надежная долговечность

**Надежные результаты – это гарантия успеха и репутации.** Высокая наполненность и микромеханическая связка полимера и наполнителей обеспечивают прочность и долговечность композитного материала. Пропитанные смолой, предварительно полимеризованные частицы наполнителя гарантируют значительную стойкость к окрашиванию.

# С композитами Neo Spectra™ ST с технологией

Подходит для любых самых распространенных случаев



## Neo Spectra™ ST

Универсальный реставрационный композитный материал

Предлагает вам выбор оптимальной для вас вязкости, 5 универсальных оттенков CLOUD shade, которые перекрывают весь диапазон оттенков шкалы VITA®¹.



Простое решение фронтальной



## Neo Spectra™ ST

Универсальный реставрационный композитный материал

Два дополнительных варианта 5 универсальных оттенков CLOUD shade. Spectra™ ST в технике упрощенной



¹ VITA не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona.

# SphereTEC® любая реставрация станет проще

для реставраций  
группы зубов



Effects  
реставрационный

та прозрачности дополняют  
LOUD shade композита Neo  
нного послойного нанесения.



Универсальный и эстетичный  
композит с адаптивной текучестью



Neo Spectra™ ST flow  
Текущий реставрационный  
композитный материал

Отличается адаптивным свойством текучести «по запросу»,  
а его оттенки идеально соответствуют портфолио универ-  
сальных композитных материалов Neo Spectra™ ST и Neo  
Spectra™ ST Effects.



# Вязкость на выбор

## Два варианта вязкости универсального композитного материала Neo Spectra™ ST

Благодаря технологии наполнителя SphereTEC® композитный материал Neo Spectra™ ST обладает улучшенными манипуляционными свойствами и предлагает 2 варианта вязкости: низкую вязкость (LV – low viscosity), которая делает его более мягким, пластичным и позволяет легче распределяться, и высокую вязкость (HV – high viscosity), характеризующуюся большей плотностью, что делает материал более плотным, пакуемым.

Возможность выбора оптимальной вязкости позволяет композиту соответствовать вашим предпочтениям и технике нанесения для эффективного и простого использования.

- Не прилипает к инструменту.
- Легко адаптируется к поверхностям полости при реставрации.
- Легко моделируется и принимает нужную форму.
- Устойчив к стеканию.



74%

стоматологов предъявляют жалобы на манипуляционные характеристики композитных материалов – адаптируемость и липкость<sup>2</sup>



## Универсальность текучего композитного материала Neo Spectra™ ST flow

Используя композит Neo Spectra™ ST flow для тех же показаний при реставрации в зоне улыбки, как и обычные текучие композиты, он способен обеспечить такую же эстетичность и надежность реставрации, которые вы можете ожидать от универсального композита, созданного на основе технологии SphereTEC®.

- Манипуляционная универсальность благодаря текучести «по запросу».
- Остается на месте, пока воздействие инструмента не инициирует текучесть.
- Отличная адаптация к полости.



66%

стоматологов используют традиционные текучие композитные материалы для реставраций V класса. В среднем 1/4 реставраций V класса приходится на фронтальную группу зубов<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Опрос пользователей композитных материалов в Европе (n=297). Dentsply Sirona Restorative, 2015 г.

<sup>3</sup> Исследование среди пользователей текучих композитных материалов. Dentsply Sirona, август 2018 г.

# Простота в эстетике


Универсальные оттенки CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST подходят для большинства клинических случаев

Отличный эффект хамелеона для упрощенного подбора оттенка композита Neo Spectra™ ST обеспечивается благодаря сочетанию первичных частиц наполнителя SphereTEC® и полимера. В большинстве случаев будет достаточно всего одного универсального оттенка CLOUD shade для выполнения реставрации.

- Всего 5 универсальных оттенков CLOUD shade перекрывают весь диапазон оттенков шкалы VITA®<sup>4</sup>.
- Надежное и точное соответствие оттенка окружающим тканям зуба.
- Меньше запасов композита – меньше затрат.
- Для реставраций отбеленных зубов доступен оттенок BW.

88%

стоматологов хранят композиты более чем 5 оттенков VITA®

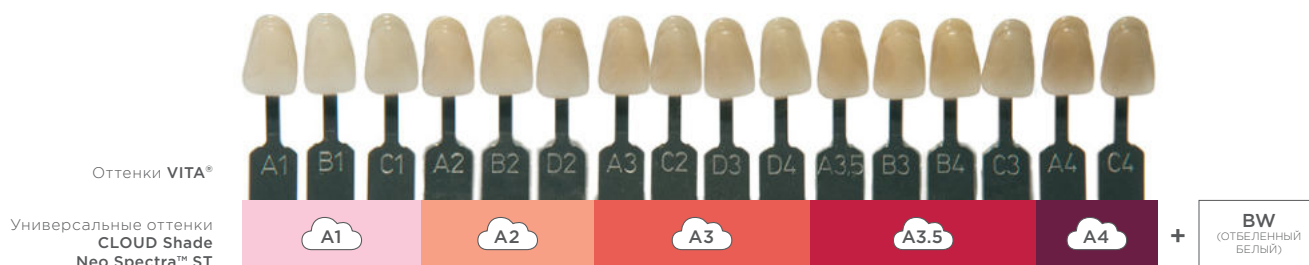

Для сложных случаев во фронтальной группе зубов дополнительно используются оттенки дентина и эмали композита Neo Spectra™ ST Effects

Для эстетических реставраций фронтальной группы зубов композитный материал Neo Spectra™ ST Effects комбинируется с универсальными оттенками CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST в технике упрощенного послойного нанесения.

- Используйте один из двух дентинных оттенков композита Neo Spectra™ ST Effects для получения дополнительной опакости.
- Для достижения эффекта прозрачности режущего края используйте один эмалевый оттенок материала Neo Spectra™ ST Effects.
- Простая комбинация и техника упрощенного послойного нанесения обеспечивают лучшие эстетические результаты.

Более 1/3

врачей считает, что при выполнении реставраций по IV классу наиболее сложным этапом является цветовая интеграция<sup>5</sup>



<sup>4</sup> Опрос по прямой реставрации (n=107). Aegis communications, 2016 г.

<sup>5</sup> The Key Group, Inc., 2018 г.

# Информация для заказа

## Neo Spectra™ ST

Универсальный композитный реставрационный материал

### ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ (HV – high viscosity)

**Стартовый набор компюль Neo Spectra™ ST Intro Kit (HV)** 60701970  
24 компюльы HV (серого цвета) по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), пистолет для компюль, наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



**Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Intro Kit (HV)** 60701980  
5 шприцев HV (серый поршень) по 3 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



**Эконабор шприцев Neo Spectra™ ST Eco Kit (HV)** 60701990  
6 шприцев HV (серый поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



#### Рефиллы

Neo Spectra™ ST (HV)

**Компюльы**  
(16×0,25 г)

**Шприцы**  
(1×3 г)



A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)

60701971

60701981

A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)

60701972

60701982

A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)

60701973

60701983

A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)

60701975

60701985

A4 (оттенки VITA® A4, C4)

60701974

60701984

BW (отбеленный белый)

60701976

### НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ (LV – low viscosity)

**Стартовый набор компюль Neo Spectra™ ST Intro Kit (LV)** 60701870  
24 компюльы LV (синего цвета) по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), пистолет для компюль, наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



**Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Intro Kit (LV)** 60701880  
5 шприцев LV (синий поршень) по 3 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



**Эко-набор шприцев Neo Spectra™ ST Eco Kit (LV)** 60701890  
6 шприцев LV (синий поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



#### Рефиллы

Neo Spectra™ ST (LV)

**Компюльы**  
(16×0,25 г)

**Шприцы**  
(1×3 г)



A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)

60701871

60701881

A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)

60701872

60701882

A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)

60701873

60701883

A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)

60701875

60701885

A4 (оттенки VITA® A4, C4)

60701874

60701884

BW (отбеленный белый)

60701876

## ООО «Дентсплай Сирона»

115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,  
«Немецкий центр промышленности и торговли», офис 9-01

Телефон +7 (495) 725-10-87

Факс +7 (495) 725-10-86

www.dentsplysirona.com

## Neo Spectra™ ST Effects\*

Универсальный композитный реставрационный материал

**Стартовый набор компюль Neo Spectra™ ST Effects** 60701940

24 компюльы HV (серого цвета) по 0,25 г (12×D1, 8×D3, 4×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков



**Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Effects** 60701950

3 шприца HV (серый поршень) по 3 г (1×D1, 1×D3, 1×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков



#### Рефиллы

Neo Spectra™ ST Effects (HV)

**Компюльы**  
(16×0,25 г)

**Шприцы**  
(1×3 г)



D1 (используется с A1, A2)

60701942

60701952

D3 (используется с A3, A3.5, A4)

60701943

60701953

E1 (используется с A1, A2, A3, A3.5, A4)

60701941

60701951

\* Только высокая вязкость (HV – high viscosity).

## Neo Spectra™ ST flow

Текучий композитный реставрационный материал

**Стартовый набор компюль Neo Spectra™ ST flow** 60701910

24 компюльы по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), пистолет для компюль, принадлежности, наклейка для шкалы оттенков



**Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST flow** 60701920

5 шприцев по 1,8 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), наклейка для шкалы оттенков, 50 канюлей для шприцев, принадлежности



#### Рефиллы

Neo Spectra™ ST flow

**Компюльы**  
(16×0,25 г)

**Шприцы**  
(2×1,8 г  
+25 канюлей)



A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)

60701911

60701921

A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)

60701912

60701922

A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)

60701913

60701923

A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)

60701915

60701925

A4 (оттенки VITA® A4, C4)

60701914

60701924

BW (отбеленный белый)

60701916

60701926

D1 (непрозрачный дентиновый)

60701918

60701928

D3 (непрозрачный дентиновый)

60701919

60701929

E1 (прозрачный эмалевый)

60701917

60701927

#### Принадлежности

Дополнительный набор канюлей для шприцев



60701932

Пистолет для компюль



60665900