

Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР

Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

ПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КАЖДОЙ ФИССУРЫ

Семейство группы Фиссурит (Фиссуритов)

К сожалению, далеко не всегда удается избежать фиссурного кариеса, соблюдая лишь хорошую гигиену полости рта. В целом, окклюзальные фиссуры и ямки - это важнейшие места преимущественной локализации кариеса у детей и подростков. Причинами повышения частоты кариеса именно в этих зонах являются, прежде всего, морфологические особенности фиссур, которые делают полноценную механическую очистку с помощью зубной щетки невозможной.

В результате, вот уже многие годы герметизация фиссур является одной из важнейших основополагающих в профилактике кариеса. Фирма VOCO предлагает различные материалы семейства Фиссурит для индивидуальных показаний, которые на протяжении многих лет успешно используются стоматологами во всем мире.

Фиссурит

Фиссурит – это прозрачный материал для герметизации фиссур, выпускаемый во флаконах. Прозрачность герметика позволяет Вам легко контролировать дно и стенки герметизированной фиссуры.


Фиссурит F

Фиссурит F – это материал для герметизации фиссур белого цвета. Он выпускается в виде жидкости во флаконах, а также в в VOCO-NDT®-дозаторе. «NDT®» обозначает Non-Dripping- («не капающую»)- технологию. NDT®-дозатор с противокапельной системой позволяет держать наготове такие высокотекучие материалы как напр., Фиссурит F, что значительно облегчает работу с пациентом. Благодаря дозатору Фиссурит F с противокапельной системой, в прошлом остались подтекание материала после применения дозатора, потеря материала и «чрезмерно заполненные» фиссуры. Кроме того, Фиссурит F содержит фторид для торможения развития кариеса. Белый цвет материала позволяет Вам визуальнo контролировать плотность краевого прилегания.

Фиссурит FX

Фиссурит FX – это высоконаполненный герметик фиссур, с помощью которого можно проводить также расширенную (инвазивную) герметизацию. После Грандио Сил Фиссурит FX является самым высоконаполненным материалом для герметизации данного класса благодаря содержанию наполнителя, составляющему 55 вес.-%. Кроме того, Фиссурит FX содержит фторид и, тем самым, тормозит развитие кариеса. Также Фиссурит FX имеет белый цвет для хорошего визуального контроля краевого прилегания герметика.

Выделение фторида

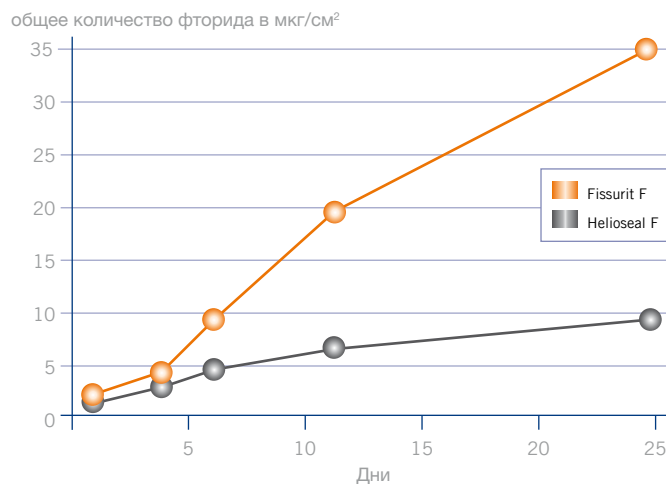

Источник: Biedermann H., Waurick M., Skölziger R., Dtsch Zahnärztl Z 52 (1997)9 S. 600 – 603

Успех Фиссурита обусловлен различными факторами:

- Фиссурит, Фиссурит F и Фиссурит FX – это однокомпонентные светоотверждаемые герметики, что позволяет экономить время и расход материала.
- Низкая вязкость материалов семейства Фиссурит гарантирует глубокое затекание герметика в фиссуру, ее заполнение и надежную герметизацию.
- Благодаря гармоничной полимерной матрице, все материалы для герметизации группы Фиссурит являются устойчивыми к абразии.
- С помощью очень тонких канюль, содержащихся в наборах Фиссурита F и Фиссурита FX, можно быстро, просто и гигиенично апплицировать герметик прямо в предварительно кондиционированную фиссуру.

Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX


ПРОВЕРЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Хорошие свойства материала подтверждены независимыми институтами

Исследование и оценка материалов для герметизации фиссур, выпускаемых фирмой VOCO, регулярно проводится различными независимыми институтами и университетами. Эти исследования подтверждают качество и длительное сохранение VOCO-герметиков в фиссурах.

В рамках одного исследования in vivo в Университете города Анкара проводился сравнительный анализ материалов Фиссурит F и Dyract Seal на предмет ретенции к твердым тканям зуба. Результаты показывают, что Фиссурит F, даже без адгезивной подготовки, сохраняется в зубе значительно дольше, чем Dyract Seal. В исследовании, проводимом в Университете города Загреб, изучались Фиссурит FX и Helioseal Clear Chroma на предмет продолжительности нахождения в фиссуре. Фиссурит FX продемонстрировал наиболее высокий показатель силы ретенции, а следовательно, наивысшую длительность и, в большинстве случаев, целостность сохранения в фиссуре.


Кумулятивное исследование через 24 месяца

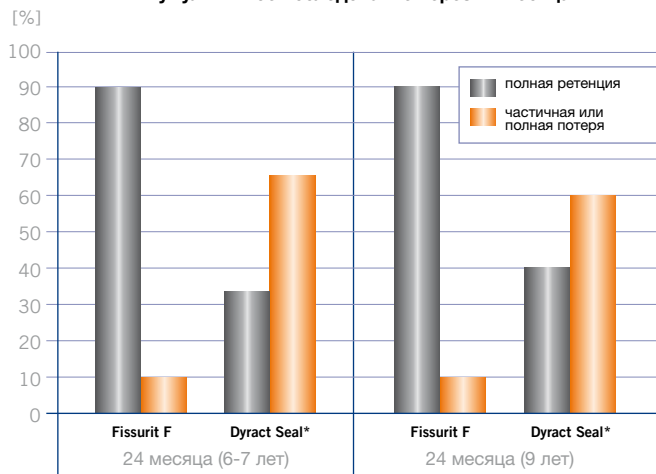

Университет г. Анкара; изучение двух различных материалов для герметизации фиссур в отношении степени их ретенции без применения адгезива: Фиссурит F демонстрирует превосходные показатели ретенции, независимо от степени созревания эмали леченного зуба.

Источник: N. Yakut, H. Sönmez, J. Clin. Pediatr. Dent. 2006, 30, 215-218


Показатель ретенции

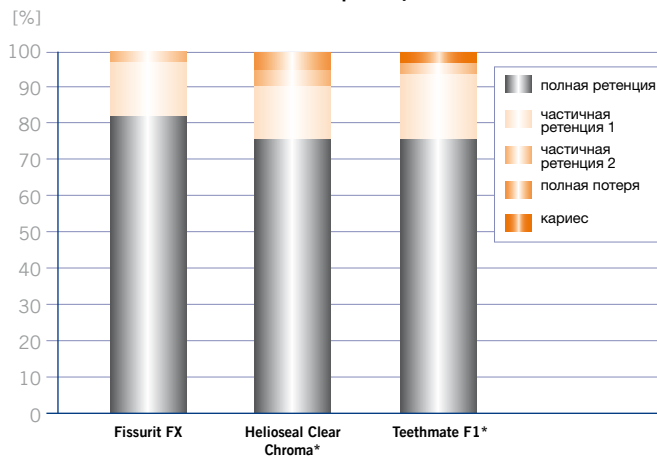

Университет г. Загреб; изучение различных материалов в клиническом одно-летнем исследовании на предмет показателя ретенции: в обследованных герметизированных фиссурах Фиссурит FX демонстрировал наивысший показатель ретенции; ни в одной фиссуре, загерметизированной с помощью Фиссурита FX, кариес выявлен не был.

Источник: W. Dukic, O. Lulic Dukic, S. Milardovic, Z. Vindakijevic, Coll. Antropol. 2007, 4, 1019-1024

Применение Fissurit®

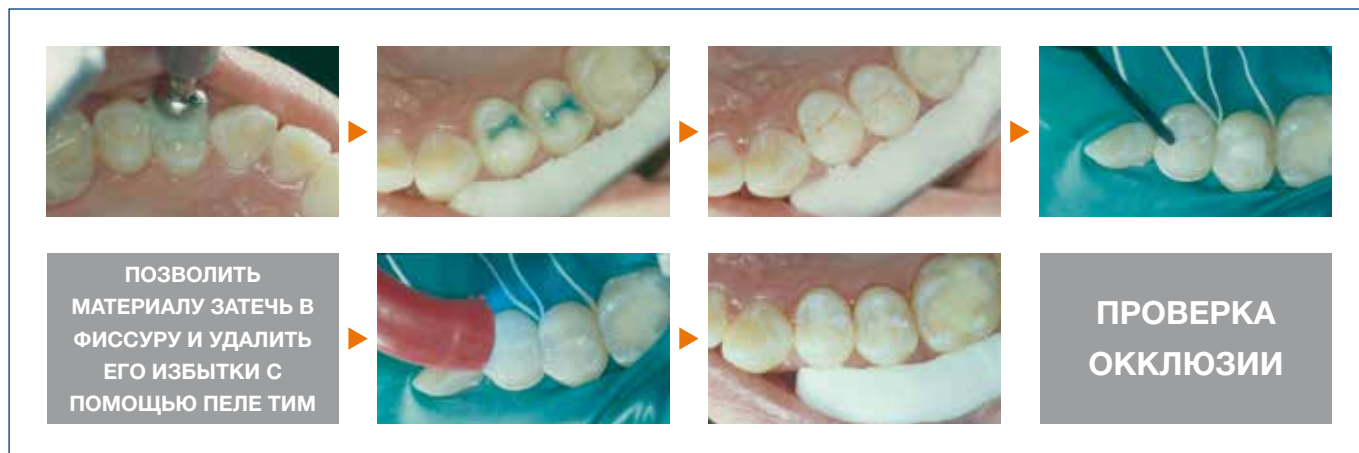

*Helioseal Clear Chroma, Teethmate F1 и Dyract Seal не являются зарегистрированными товарными знаками фирмы VOCO.

Fissurit® · Fissurit F® · Fissurit® FX

ОБЗОР ПОКАЗАНИЙ И ПРЕИМУЩЕСТВ

Fissurit® FX



Показания

Герметизация фиссур и окклюзионных поверхностей с целью профилактики кариеса

Герметизация расширенных фиссур

Пломбирование небольших полостей

Преимущества

- Содержание наполнителя составляет 55 вес.-% для отличной устойчивости к абразии
- Быстрое и простое применение с помощью дозатора для прямой аппликации с гибкими металлическими канюлями
- Оптимальная текучесть
- Высокая стабильность и хорошая связь с эмалью
- Постоянное выделение фторида
- Белый для простоты визуального контроля

Формы выпуска

Фиссурит FX

REF 1181 2 дозатора по 2,5 г, аппликационные канюли, тип 40

Fissurit® F



Показания

Герметизация фиссур и окклюзионных поверхностей для профилактики кариеса

Облицовка поврежденной поверхности эмали

Изоляция композитных и цементных пломб (защита от влаги)

Реставрация небольших кариозных повреждений

Ремонт небольших дефектов в композитных и амальгамных пломбах

Преимущества

- Быстрая и простая аппликация из нового NDT®-дозатора
- Белый для простоты визуального контроля
- Отличная текучесть благодаря низкой вязкости
- Высокая стабильность и хорошая связь с эмалью
- Постоянное выделение фторида

Fissurit® F

REF 1180 2 флакона по 3 мл

REF 1292 2 дозатора по 2 г с аппликационными канюлями, тип 40

REF 1293 Комплект: 5 дозаторов по 2 г, 5 мл Гель Вокоцид, 2 дозатора по 3 мл Жидкость Вокоцид, принадлежности

Fissurit®



Показания

Герметизация фиссур и окклюзионных поверхностей для профилактики кариеса

Облицовка поврежденной поверхности эмали

Изоляция композитных и цементных пломб (защита от влаги)

Реставрация небольших кариозных повреждений

Ремонт небольших дефектов в композитных и амальгамных пломбах

Преимущества

- Прозрачный
- Высокая стабильность и хорошая связь с эмалью
- Прошел клиническую проверку на протяжении многих лет
- Позволяет проводить контроль активности кариеса под герметиком

Fissurit®

REF 1082 2 флакона по 3 мл, прозрачный

VOCO GmbH
Postfach 767
27457 Cuxhaven
Германия

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.com

Представлено: