

FUSION SELF COMP

Самоотверждаемый двухкомпонентный наногибридный композит (паста-паста)

**PREVEST DenPro®**
БУДУЩЕЕ СТОМАТОЛОГИИ**Описание продукта:**

Self Comp - химически отверждаемый композит на основе полимеров с содержанием наполнителя 80% в весовом отношении. Self Comp предлагается в универсальном оттенке (A2), который подходит для большинства пациентов.

Состав:**Основная паста:**

диметакрилат уретана, этоксилированный диметакрилат бисфенола А, диметакрилат триэтиленгликоля, диглицидилметакрилат бисфенола А, порошок бариевых стекол, аморфная коллоидальная двуокись кремния, отвердитель, стабилизатор.

Паста-катализатор:

диметакрилат уретана, этоксилированный диметакрилат бисфенола А, диметакрилат триэтиленгликоля, диглицидилметакрилат бисфенола А, порошок бариевых стекол, аморфная коллоидальная двуокись кремния, отвердитель, стабилизатор.

Показания: использование композита Self Comp рекомендовано в следующих случаях:- установка пломб класса III - V, установка пломб класса I и II, которые не подвергаются окклюзионным нагрузкам, обширная герметизация фиссур, наращивание вкладок - реконструкция травмированных зубов - эстетическая реставрация (например, диастема, гипоплазия, конические зубы, эрозии)**Инструкция по применению:** Очистить зубы чистящей пастой без фтора. Рекомендуется использовать минимально инвазивную технику / технику пломбирования для сохранения ткани здоровых зубов. Очистку и сушку полости выполняют специальными препаратами (например, раствором перекиси водорода). Соблюдать инструкции по применению при нанесении материалов для бондирования. Применять защиту пульпы при работе в непосредственной близости от пульпы. Рекомендуется выстилание глубоких полостей стеклоиономерным цементом ввиду выделения фтора. Выполнить скос краев эмали и травление в течение 20 - 30 секунд (гель Actino). Затем тщательно промыть и высушить. Не протравливать дентин больше 15 секунд при использовании метода полного травления. Использовать соответствующий бондинговый агент согласно его инструкции по применению. Смешать равные количества основной и каталитической пасты Self Comp с помощью шпателя. Смешивание производить в течение примерно 15 - 30 секунд, до получения однородной массы. Не использовать один и тот же конец шпателя для основной пасты и пасты-катализатора. Если следы одной пасты попадут в другую, композит использовать нельзя. Просушить полость перед применением. Время манипулирования (рабочее) Self Comp составляет порядка 2 мин, время схватывания 3-4 мин. Не перемещать разделительные полоски (штрипсы) или матрицу в течение этого времени. Удалить все большие скопления избыточного материала с помощью алмазного бора. Для обработки рекомендуется использовать диски с градуированной зернистостью или финишные алмазные боры (лингвальная, небная области). Алмазные металлические полоски подходят для аппроксимальных участков. Затем отполировать соответствующей полировочной пастой. Фторсодержащий лак следует наносить на все обработанные зубы, чтобы способствовать реминерализации.**Меры предосторожности:** В случае загрязнения протравить уже протравленные поверхности еще в течение 5 секунд, промыть и высушить. Не использовать фотополимерные однокомпонентные бонды вместе с композитом Self Comp. Композит Self Comp содержит бисфенол А глицидил метакрилат, бутилгидрокситолуол, пероксид бензоила; некоторые пациенты (например, с аллергиями) могут быть чувствительными к этим ингредиентам. Не следует использовать композит Self Comp, если полость невозможно высушить, не представляется возможным использовать предписанную методику или если у пациента в анамнезе имеются аллергические реакции на ингредиенты композита. Средства, содержащие эвгенол, оказывает негативное влияние на полимеризацию химических реставраций. Поэтому, следует избегать использования цинк-оксидных эвгеноловых цементов или других средств, содержащих эвгенол. Катионные жидкости для полоскания рта, детекторы зубного налета и хлоргексидин могут вызвать обесцвечивание реставрации, поэтому их использования следует избегать.**Внимание:**

Избегать длительного или многократного контакта с кожей (аллергический контактный дерматит) и глазами. Избегать вдыхания в течение длительного времени. Не принимать внутрь. Контакт с кожей может вызвать раздражение, ожоги, гиперчувствительность. При попадании на кожу немедленно тщательно протереть пострадавший участок ватой и спиртом, а затем тщательно промыть водой с мылом. При возникновении кожной сыпи и сенсибилизации или других аллергических реакций прекратить использование и обратиться к врачу. При попадании продукта в глаза, тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. Не использовать для лечения пациентов с тяжелой аллергической реакцией на любой из компонентов продукта в анамнезе.

Условия хранения: Хранить при температуре от 10 °С до 24 °С. Тщательно закрывать крышку после использования. Хранить в сухом месте. При хранении в сухом прохладном месте после вскрытия упаковки композит годен в течение указанного срока хранения.**Срок годности:** 2 года от даты изготовления.**Упаковка:**

Кат.№: 20010

14г-основная паста, 14г-паста-катализатор, шпатель для замешивания, замешивающие блоки, инструкция по применению.

Утилизация: Утилизировать в соответствии с действующими правилами страны использования.

Prevest DenPro Limited Unit II, EPIP, Bari Brahma, Jammu-181133, India. www.prevestdenpro.com Custome Care No.: 1800-180-7172 Email:customercare@prevestdenpro.com	EC	REP		
	Obelis s.a Boulevard General Wahis 53 1030Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732 59 54, Fax +(32) 2 732 60 03 E-mail: mail@obelis.net		Редакция : 05 Дата : 23-05-2019	

Код партии Использовать до Не стерильно Беречь от влаги Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации Номер в каталоге Официальный представитель в ЕС Не применять при повреждении упаковки

Беречь от детей Наименование и адрес изготовителя Ограничение температуры Не допускать попадания солнечного света

Материал разработан исключительно для профессионального использования в стоматологии. Применение должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией по применению. Ответственность за ущерб, возникший из-за несоблюдения предписанных условий применения, не принимается. Пользователь несет ответственность за проверку материала на его пригодность и использование в любых целях, явно не указанных в данной инструкции. Описание и данные не являются гарантией свойств и не несут обязывающий характер.

FUSION SELF COMP Самоотверждаемый двухкомпонентный наногибридный композит (паста-паста)Материалы композитные стоматологические **FUSION** с принадлежностями.

Комплектацию смотри на упаковке. Производитель: «Превест Денпро Лимитед», Индия, PREVEST DENPRO LIMITED, Export Promotion Industrial Park, (EPIP), Bari Brahma, 181133 Jammu, India PУ: № ФСЗ 2011/10852 от 27.02.2020 г. Срок годности указан на упаковке.

Утилизировать в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченная организация для предъявления претензий на территории РФ: ООО СП «ХИРАТРЕЙД», тел.: +7(4922) 42-05-32, email: info@hiratrade.ru