

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
набора гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов  
**«БЕЛАГЕЛЬ®»**  
по ТУ 9391-050-45814830-2004  
реминерализирующего геля  
**«БЕЛАГЕЛЬ®»-Са/Р**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений, так и в домашних условиях под наблюдением стоматолога.

Набор гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов «Беллагель»-Са/Р (далее по тексту – материал «Беллагель»-Са/Р) предназначен для профилактики кариеса на начальной его стадии - белого пятна; для реминерализации эмали при некариозных ее поражениях, возникших в период формирования зубов; при гиперестезии твердых тканей зуба, гипоплазии эмали, эрозии твердых тканей зуба и т.п.

Материал «Беллагель»-Са/Р предназначен для применения как в условиях медицинского учреждения, так и в домашних условиях под наблюдением стоматолога.

**СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

Составные компоненты материала «Беллагель»-Са/Р – ионы кальция и фосфора, входящие в состав здоровой зубной эмали, активно проникают в эмаль и дентин пораженных зубов и способствуют их минерализации.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**ВНИМАНИЕ:** *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Возможны два способа применения материала «Беллагель»-Са/Р: в виде пленки, образующейся на поверхности зубов, и в виде длительной аппликации с применением каппы.

Перед применением препарата реминерализируемую поверхность зуба очистить от мягкого налета и высушить.

Затем внутрь каппы выдавить тонкой полоской материал «Беллагель»-Са/Р. Каппу надеть на зубы и держать в установленном врачом режиме, желательно, всю ночь. После чего каппу снять, зубы промыть водой.

Если нет индивидуальной каппы, нанести гель на зубы тонким равномерным слоем. Высушить образующуюся пленку потоком воздуха в течение 5-7 минут. Чтобы избежать преждевременного удаления пленки, рекомендуется в течение 3-5 часов не принимать твердую пищу и не чистить зубы.

На курс лечения назначают 10-15 аппликаций материала «Беллагель»-Са/Р ежедневно или через день. При необходимости курс повторить.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

Гель (шприц или туба)	- 5 мл или 10 г
Аппликаторы	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск материала «Беллагель»-Са/Р другой комплектности или в виде отдельных изделий.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, в плотно закрытых шприцах при температуре от **+5°C до +25°C**.

Срок годности - **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°C до +30°C**.