

DenFil™ Etchant-37



Гель протравочный на основе фосфорной кислоты (37%)

Характеристики

- DenFil™ Etchant – протравочный гель, загущенный с помощью полимерных материалов;
- оптимальная консистенция (полугель) и цвет обеспечивают удобство в работе, позволяют контролировать качество нанесения препарата на эмаль и в отличие от травящих растворов, исключают его попадание на дентин и слизистую оболочку полости рта;
- быстро действует и легко удаляется с поверхности;
- не оставляет следов на поверхности протравленного зуба в отличие от протравочных гелей на кремнезёмной основе.

Состав

- фосфорная кислота 37%;
- очищенная вода;
- краситель;
- вспомогательные вещества;

Противопоказания

Не применять на мягкие ткани, слизистую оболочку потовой полости и пульпу зуба.

Применение

Обеспечивает необходимую микро-шероховатость эмали, что способствует повышению прочности соединения пломбировочного материала с твердыми тканями зуба, уменьшает краевую проницаемость при пломбировании и снижает риск возникновения вторичного кариеса.

Методика травления

1. Изолируйте зуб и подготовьте полость согласно общепринятой методике.
2. Снимите колпачок и наденьте на шприц одноразовую канюлю.
3. Нанесите гель протравочный и выдержите 15 секунд. Тщательно промойте водой и просушите слабым потоком воздуха в течение 1-2 секунд.
4. Убедитесь, что поверхность приняла меловидный цвет. Избегайте попадания слюны на просушенную поверхность.
5. При необходимости повторите шаги 3-4.

Условия хранения

- Хранить при температуре +2°C до +27°C.
- После применения необходимо плотно закрывать крышку флакона с материалом.

Предупреждение

- Применять только в стоматологической практике.
- Избегать попадания на кожу.

- При попадании в глаза и на кожу промыть пораженный участок большим количеством воды и при необходимости обратиться в специализированное учреждение.
- При работе с материалом рекомендуется использовать защитные перчатки.
- Беречь от детей.
- При попадании препарата внутрь организма срочно обратиться в отделение токсикологии.
- Не использовать после окончания сроков годности.
- Хранить при температуре +2°C до +27°C.

Условные обозначения (EN980)



Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несёт ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr