
















FUSION I-SEAL Светоотверждаемый стеклоиономерный композитный цемент	 PREVEST DenPro® БУДУЩЕЕ СТОМАТОЛОГИИ											
<p>Описание продукта: Однокомпонентный цемент Fusion I-Seal, фотополномерный стеклоиономерный цемент для подкладки под пломбировочный материал, герметизации больших фиссур и мелких повреждений зуба.</p> <p>Состав: уретан-диметакрилатная смола, бисфенол А глицидил метакрилат, сульфат бария, порошок фтороалюмосиликатного стекла, порошок силанированного бариевого стекла, аморфная коллоидальная двуокись кремния, фотоинициаторы и стабилизаторы</p> <p>Показания: ♦ Формирование подкладок под все виды пломбировочных материалов ♦ Герметизация больших фиссур ♦ Реставрация небольших поражений.</p> <p>Инструкция по применению: Тщательно очистить и высушить полость воздухом. Нанести материал непосредственно на полость с помощью насадки на аппликатор. Толщина слоя - не более 1 мм. Фотополимеризация в течение 30-40 секунд по стандартной методике, затем применить стандартную методику реставрации.</p> <p>Внимание: Избегать длительного или многократного контакта с кожей (аллергический контактный дерматит) и глазами. Избегать вдыхания в течение длительного времени. Не принимать внутрь. Контакт с кожей может вызвать раздражение, ожоги, гиперчувствительность. При попадании на кожу немедленно тщательно протереть пострадавший участок ватой и спиртом, а затем тщательно промыть водой с мылом. При возникновении кожной сыпи и сенсibilизации или других аллергических реакций прекратить использование и обратиться к врачу. При попадании продукта в глаза, тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. Не использовать для лечения пациентов с тяжелой аллергической реакцией на любой из компонентов продукта в анамнезе.</p> <p>Противопоказания: Не использовать цемент Fusion I-Seal в случаях, когда известно, что у пациента аллергия на метакрилат или любой из его компонентов.</p> <p>Условия хранения: Хранить при температуре от 10 ° С до 24 ° С. Тщательно закрывать крышку после использования. Хранить в сухом месте. При хранении в сухом прохладном месте после вскрытия упаковки цемент годен в течение указанного срока хранения.</p> <p>Срок годности: 3 года от даты изготовления</p> <p>Упаковка: Кат.№: 30002-1 Пробный набор: 1 шприц объемом 2г + 5 канюль. Кат.№: 30002 Начальный набор: 2 шприца объемом 2г + 10 канюль. Кат.№: 30003 Эконом-набор : 4 шприца объемом 2г + 20 канюль. Кат.№: 30003-1 Начальный набор: 1 шприц объемом 3г + 10 канюль. Кат.№: 30003-2 Набор : 2 шприца объемом 3г + 20 канюль.</p> <p>Утилизация: Утилизировать в соответствии с действующими правилами страны использования.</p>												
 Prevest DenPro Limited Unit II, EPIP, Bari Brahmama, Jammu-181133, India. www.prevestdenpro.com Custome Care No.: 1800-180-7172 Email:customercare@prevestdenpro.com	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">EC</td> <td style="text-align: center;">REP</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obelis s.a Boulevard General Wahis 53 1030Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732 59 54, Fax +(32) 2 732 60 03 E-mail: mail@obelis.net</td> </tr> </table>	EC	REP	Obelis s.a Boulevard General Wahis 53 1030Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732 59 54, Fax +(32) 2 732 60 03 E-mail: mail@obelis.net		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  0123 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Редакция :</td> <td style="text-align: center;">05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Дата :</td> <td style="text-align: center;">23-05-2019</td> </tr> </table>	 0123		Редакция :	05	Дата :	23-05-2019
EC	REP											
Obelis s.a Boulevard General Wahis 53 1030Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732 59 54, Fax +(32) 2 732 60 03 E-mail: mail@obelis.net												
 0123												
Редакция :	05											
Дата :	23-05-2019											
<p>  Код партии  Использовать до  Не стерильно  Беречь от влаги  Осторожно!  Обратитесь к руководству по эксплуатации  Номер в каталоге  Официальный представитель в ЕС  Не применять при повреждении упаковки  Беречь от детей  Наименование и адрес изготовителя  Ограничение температуры  Не допускать попадания света </p>												
<p>Материал разработан исключительно для профессионального использования в стоматологии. Применение должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией по применению. Ответственность за ущерб, возникший из-за несоблюдения предписанных условий применения, не принимается. Пользователь несет ответственность за проверку материала на его пригодность и использование в любых целях, явно не указанных в данной инструкции. Описание и данные не являются гарантией свойств и не носят обязывающий характер.</p>												
<p>FUSION I-SEAL Светоотверждаемый стеклоиономерный композитный цемент Материалы композитные стоматологические FUSION с принадлежностями. Комплектацию смотри на упаковке. Производитель: «Превест Денпро Лимитед», Индия, PREVEST DENPRO LIMITED, Export Promotion Industrial Park, (EPIP), Bari Brahmama, 181133 Jammu, India. РУ: № ФСЗ 2011/10852 от 27.02.2020 г. Срок годности указан на упаковке. Утилизировать в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченная организация для предъявления претензий на территории РФ: ООО СП «ХИРАТРЕЙД», тел.: +7(4922) 42-05-32, email: info@hiratrade.ru</p>												