

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора жидкостей эндодонтических для лечения пульпитов
«ПУЛЬПЕВИТ®»
по ТУ 9391-088-45814830-2004

НАЗНАЧЕНИЕ:

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Набор жидкостей эндодонтических для лечения пульпитов «Пульпевит» (далее по тексту – набор жидкостей «Пульпевит») предназначен для обезболивания при медикаментозных или травматических пульпитах и периодонтитах, при острых пульпитах перед применением мышьяковой пасты (жидкость № 1), для антисептической обработки каналов при осложненном пульпите, резекции верхней части корня (жидкость № 2), а также для лечения осложненного кариеса молочных зубов (жидкость № 3).

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Жидкость № 1 содержит: лидокаина гидрохлорид, обеспечивающий болеутоляющее действие; хлорфенол, крезол – антисептики широкого спектра действия, не вызывающие раздражений, и лишь незначительно мумифицирующие нервные волокна. Жидкость можно использовать в качестве компресса длительного действия для «купирования» пульпита в случаях невозможности продолжить лечение.

Жидкость № 2 содержит антисептики: фенол, эвгенол, а также формальдегид, что обеспечивает антисептические свойства и глубокую мумификацию, а также стерилизацию корневых каналов зубов (в частности, после кисты, абсцесса, свища). В состав входит дексаметазон (0,05%) – кортикостероид, значительно снижающий болезненность периапикальных тканей.

Жидкость № 3 (формокрезол) содержит формальдегид (19%) и крезол (35%). Формокрезол в зависимости от продолжительности воздействия, приводит к частичной или полной мумификации корневой пульпы молочного зуба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Жидкость № 1 применяют, используя турунды или ватные шарики (компрессы), которые пропитывают и слегка отжимают. При глубоком кариесе и острых пульпитах тампон, пропитанный жидкостью № 1, положить в полость (как можно ближе к пульпе) под временную пломбу, стараясь не нажимать. В случаях, когда пациент не может по каким-либо причинам продолжить лечение, препарат можно использовать в качестве непроницаемого компресса (пропитанный ватный шарик) длительного действия под временной пломбой. Через некоторое время (5-10 дней), которое определяется врачом, можно приступить к окончательному лечению зуба.

Жидкость № 2 применяют, используя турунды, которые пропитывают и тщательно отжимают, не допуская подтекание препарата, так как высокая концентрация формальдегида и фенола может вызвать неприятные ощущения. Пропитанными турундами обрабатывают каналы, а также используют для временного компресса. При смешивании жидкости № 2 с окисью цинка образуется незатвердевающая антисептическая лечебная паста для временного пломбирования.

Жидкость № 3 (формокрезол) применяют при пульпотомии двумя способами: кратковременно и пролонгированно.

Для кратковременного применения после ампутации коронковой пульпы ватный тампон, пропитанный формокрезолом, помещают на рану и оставляют на 3-5 минут. Затем тампон удаляют, ампутированную рану покрывают цинкоксидэвгенольным цементом («Эодент» (быстротвердеющий) и проводят постоянное пломбирование.

Для пролонгированного применения пропитанную формокрезолом ватную турунду помещают на ампутированную рану под временным герметичным покрытием («Дентин – порошок»). Через 5-7 дней турунду удаляют, ампутированную рану покрывают цинкоксидэвгенольным цементом и проводят постоянное пломбирование.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Жидкость № 1 (флакон)	- 15 мл
Жидкость № 2 (флакон)	- 15 мл
Жидкость № 3 (флакон)	- 15 мл
Крышка-капельница	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск набора жидкостей «Пульпевит» в виде отдельных изделий или другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном месте, в плотно закрытой таре при температуре **от +5°C до +25°C**. Срок годности - **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°C до +30°C**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки набора жидкостей «Пульпевит» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04653 от 21.12.2017 г.