

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набора гелей для травления твердых тканей зуба «ВладМиВа»
по ТУ 9391-034-45814830-2000

- I. Набор гелей для травления твердых тканей зуба: гель для травления эмали;
гель для травления дентина
- II. Гель для травления эмали
- III. Гель для травления дентина

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор гелей для травления твердых тканей зуба «ВладМиВа» предназначен для травления твердых тканей зуба (далее по тексту – набор гелей для травления твердых тканей зуба).

Набор гелей для травления твердых тканей зуба предназначен для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения. Область применения – стоматология.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Преобразование препарированной поверхности для усиления адгезии реставрационного материала к тканям зуба при лечении кариозных образований.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость одного из компонентов.
Не использовать не по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания гелей на мягкие ткани полости рта или кожу. При попадании немедленно промыть водой.

В случае попадания гелей в глаза необходимо немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью к врачу.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Гель для травления эмали содержит ортофосфорную кислоту, гелеобразователь и краситель. При нанесении геля на эмаль на поверхности эмали образуется микрошероховатость, которая увеличивает силу сцепления твердых тканей зуба с пломбировочным материалом.

Гель для травления дентина содержит малеиновую кислоту, гелеобразователь и краситель. При обработке дентина гелем удаляется смазанный слой, раскрываются дентинные каналы, что обеспечивает более высокую адгезию пломбировочного материала к дентину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

1. Гель для травления эмали

Снять колпачок со шприца с гелем для травления эмали. Надеть иглу. Нанести необходимое количество геля для травления эмали на сухую подготовленную поверхность эмали на 30-40 секунд или дентина на 15 секунд. По истечении времени обработки, гель

для травления тщательно смыть большим количеством воды и высушить сжатым воздухом. Правильно протравленная поверхность должна иметь матово-белый оттенок.

Снять иглу, надеть колпачок на шприц.

2. Гель для травления дентина.

Снять колпачок со шприца с гелем для травления дентина. Надеть иглу. Нанести необходимое количество геля для травления дентина на сухую поверхность подготовленного дентина на 30-40 секунд. По истечении времени обработки, гель для травления тщательно смыть большим количеством воды и просушить дентин, не допуская пересушивание.

Снять иглу, надеть колпачок на шприц.

ФОРМА ВЫПУСКА

I. *Набор гелей для травления твердых тканей зуба: гель для травления эмали, гель для травления дентина*, в комплектации:

- | | |
|---|---------|
| - шприц с гелем для травления эмали 5 мл / 2 мл | - 1 шт. |
| - шприц с гелем для травления дентина 5 мл / 2 мл | - 1 шт. |
| - иглы | - 3 шт. |
| - картонная упаковка | - 1 шт. |
| - инструкция по применению | - 1 шт. |

II. *Гель для травления эмали*, в комплектации:

- | | |
|--|---------|
| - шприц с гелем для травления эмали 2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 100 мл | - 1 шт. |
| - иглы* | - 3 шт. |
| - картонная упаковка | - 1 шт. |
| - инструкция по применению | - 1 шт. |

III. *Гель для травления дентина*, в комплектации:

- | | |
|--|---------|
| - шприц с гелем для травления дентина 2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 100 мл | - 1 шт. |
| - иглы* | - 3 шт. |
| - картонная упаковка | - 1 шт. |
| - инструкция по применению | - 1 шт. |

* кроме комплектации 20 мл / 100 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре **от +5°C до +25°C**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

Срок годности - **3 года**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.