

# ЕРИТЕХ ЭПИТЕКС

## ШТРИПСЫ ДЛЯ ФИНИРОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ

Материал предназначен только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Оформление контуров реставраций из стеклоиономерных и композитных материалов, финирирование и полирование аппроксимальных поверхностей.

	Ширина	Длина	Толщина	Зернистость	Применение
Крупная (голубая)	5 мм	10 м	50 мкм	#280	Оконтуривание
Средняя (зеленая)	5 мм	10 м	50 мкм	#500	Финирирование
Мелкозернистая (серая)	5 мм	10 м	50 мкм	#800	Полирование
Сверхмелкозернистая (розовая)	5 мм	10 м	50 мкм	#1200	Полирование
Матрица (прозрачная)	5 мм	10 м	50 мкм	-	Формирование реставрации перед фотополимеризацией

1. Удалите избыток реставрационного материала с помощью подходящего инструмента.
2. Выберите штрипс подходящей зернистости.
3. Вставьте штрипс между точками интерпроксимального контакта. Крепко удерживая оба конца штрипса, потяните его вперед-назад.
4. Использованные штрипсы утилизируйте.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Штрипсы ЕРИТЕХ обладают острыми краями. При работе со штрипсами надевайте защитные очки и перчатки. Внимательно следите за тем, чтобы не повредить мягкие ткани полости рта пациента.
2. Штрипсы предназначены исключительно для одноразового применения во избежание перекрестного инфицирования. Утилизируйте штрипсы в соответствии с действующими нормами местного законодательства.

### УПАКОВКИ

1. Стартовый набор  
1 диспенсер (10 м) штрипсов каждой степени абразивности и диспенсер с матрицей,  
1 настольная подставка для диспенсеров
2. Отдельно: диспенсер со штрипсом любой степени абразивности или матрицей 1 диспенсер (10 м)

### ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре и пониженной влажности.