

Инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая с алмазным наполнителем для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов «Polir Diamant-felt» ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 24.08.2021 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-felt» с алмазным наполнителем предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-felt» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме. «Polir Diamant-felt» представляет собой войлочные диски, пропитанные алмазной пастой. За счёт оптимального сочетания войлочного диска с тонким алмазным абразивным материалом осуществляется полировка поверхности зубных протезов из керамических материалов до зеркального блеска.

Способ применения

Закрепите войлочный диск при помощи винта в дискодержатель, вставьте дискодержатель в зуботехнический наконечник бормашины, полировку проводите со скоростью не более 15000 об/мин. при равномерной силе нажима на полирующую поверхность.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

1. Войлочные диски, пропитанные пастой - 50 шт., дискодержатель - 2 шт., в коробке полимерной;
 2. Войлочные диски, пропитанные пастой не более 20 шт., дискодержатель – 1 шт., в пакете полимерном.
- Форма выпуска указана на упаковке.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98 %. Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Срок годности 5 лет с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель

ООО «Целит», 394028 г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru