

Материал ACTINO GEL

Стоматологический гель для протравливания



Описание продукта: Actino gel - вязкий гель синего цвета с 37% фосфорной кислотой для травления зубной эмали и обработки дентина или композитных поверхностей перед бондированием любых композитов, герметиков или бондирующих адгезивов.

Состав: фосфорная кислота, индикатор метиленового синего, глицерин, этанол, очищенная вода и аморфный кремнезем.

Показания: Использование для обработки поверхностей зубной эмали и дентина перед установкой адгезивной реставрации.

Инструкция по применению: Очистить участок травления, тщательно промыть и высушить. Поместить наконечник на поверхность, подлежащую травлению, и медленно нанести гель на поверхность, чтобы нанести тонкую линию или тонкий слой на участки, подлежащие травлению. Оставить гель на 10-15 секунд и тщательно смыть его струей воды. Высушить протравленную поверхность зуба чистым, сухим воздухом.

Меры предосторожности: Продукт содержит фосфорную кислоту. Может вызывать ожоги и раздражение тканей, что ограничивает область травления. Прикрепить наконечник аппликатора к шприцу и проверить подачу геля перед нанесением на поверхность травления. Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей.

Внимание: Избегать длительного или многократного контакта с кожей (аллергический контактный дерматит) и глазами. Избегать вдыхания в течение длительного времени. Не принимать внутрь. Контакт с кожей может вызвать раздражение, ожоги, гиперчувствительность. При попадании на кожу немедленно тщательно протереть пострадавший участок ватой и спиртом, а затем тщательно промыть водой с мылом. При возникновении кожной сыпи и сенсибилизации или других аллергических реакций прекратить использование и обратиться к врачу. При попадании продукта в глаза, тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. Не использовать для лечения пациентов с тяжелой аллергической реакцией на любой из компонентов продукта в анамнезе.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 10°C до 24°C. Тщательно закрыть крышку после использования. Хранить в сухом месте. При хранении в сухом прохладном месте после вскрытия упаковки годен в течение указанного срока хранения.

Срок годности: 3 года от даты изготовления.

Упаковка:

Пробный набор: 1 шприц объемом 2мл, 5 канюль (Кат №: 10006-1),

Пробный набор: 1 шприц объемом 3мл, 10 канюль (Кат №: 10006-2),

Начальный набор: 1 шприц объемом 5мл, 10 канюль. (Кат №: 10006),

Эконом-набор: 4 шприца объемом 5мл, 40 канюль (Кат №: 10007),

Большой набор: 1 шприц с гелем Actino объемом 50 мл, 2 пустых шприца объемом 5мл, 1 комплект канюль 20 шт. (Кат №: 10008)

Утилизация:

Утилизировать в соответствии с действующими правилами страны использования.

Prevest DenPro Limited Unit II, EPIP, Bari Brahmana, Jammu-181133, India. www.prevestdenpro.com Custome Care No.: 1800-180-7172 Email: customercare@prevestdenpro.com

Obelis s.a Boulevard General Wahis 53 1030Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732 59 54 Fax +(32) 2 732 60 03 E-mail: mail@obelis.net

Редакция : 06
Дата : 23-05-2019

Код партии Использовать до Не стерильно Беречь от влаги Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации Номер в каталоге Официальный представитель в ЕС Не применять при повреждении упаковки Беречь от детей Наименование и адрес изготовителя Ограничение температуры Не допускать попадания солнечного света Корродирующий агент

Материал разработан исключительно для профессионального использования в стоматологии. Применение должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией по применению. Ответственность за ущерб, возникший из-за несоблюдения предписанных условий применения, не принимается. Пользователь несет ответственность за проверку материала на его пригодность и использование в любых целях, явно не указанных в данной инструкции. Описание и данные не являются гарантией свойств и не носят обязывающий характер.

Материал Actino Gel Стоматологический гель для протравливания

Материалы композитные стоматологические **FUSION** с принадлежностями.

Производитель: «Превест Денпро Лимитед», Индия, PREVEST DENPRO LIMITED, Export Promotion Industrial Park, (EPIP), Bari Brahmana, 181133 Jammu, India, РУ: № ФСЗ 2011/10852 от 27.02.2020 г. Срок годности указан на упаковке. Утилизировать в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченная организация для предъявления претензий на территории РФ: ООО СП «ХИРАТРЕЙД», тел.: +7(4922) 42-05-32 email: info@hiratrade.ru