

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
пасты иодосодержащей для обработки инфицированных каналов зубов  
и слизистой оболочки полости рта  
**"БЕЛАИОД®"**  
по ТУ 9391-056-45814830-2002

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Паста иодосодержащая для обработки инфицированных каналов зубов и слизистой оболочки полости рта «Белаиод» (далее по тексту – паста «Белаиод») предназначена для антисептической обработки слизистой оболочки полости рта (стоматиты, гингивиты, пародонтит), а также для обработки инфицированных корневых каналов.

**СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

Паста «Белаиод», активным компонентом которой является йод, обладает мощным бактерицидным эффектом в отношении стафилококков, candida albicans и т.п., является альтернативой антибиотикам при лечении пародонтита.

Присутствие в пасте «Белаиод» лецитина и глицерина смягчает и пролонгирует действие иода.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**ВНИМАНИЕ:** *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

При антисептической обработке слизистой нанести гладилкой необходимое количество пасты «Белаиод» на воспаленную область. Через сутки процедуру повторить. Для лечения гингивита достаточно 2-3 сеансов.

Для антисептической обработки инфицированных каналов ввести пасту «Белаиод» в верхнюю часть очищенного канала и смазать дно кариозной полости небольшим количеством пасты «Белаиод». Полость закрыть искусственным дентином («Дентин-паста» или «Дентин-порошок»). Через 2-3 дня очистить канал от пасты «Белаиод», тщательно промыть и провести дальнейшие манипуляции по пломбированию канала и реставрации коронки зуба.

**Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость йода.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

Паста (шприц)	- 3 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Хранить в герметично закрытых шприцах при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности – 3 года.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

### **ВНИМАНИЕ:**

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

*Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.*

*Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.*

*Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.*

*В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.*

*О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.*

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки пасты «Белаиод» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12001 от 26.09.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.