

ЭТИКЕТКА-ИНСТРУКЦИЯ

Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс» по ТУ 9391-005-10614163-98

РУ № ФСР 2009/04528 от 13.01.2020 г.

Назначение

Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс» является медицинским изделием, выпускается в нестерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от гипса, используемого при изготовлении зубных протезов в зуботехнических лабораториях..

Способ применения

Перед нанесением «Изолак» гипс-гипс» необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой модели. Требуемое количество лака налить в отдельную ёмкость и кисточкой равномерно нанести, на отвердевшую поверхность гипсовой модели, выдержать в течение 1-2 минут.

Комплект поставки

1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (125±5) мл - 1 шт;
Этикетка-инструкция - 1 шт.
2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (500±5) мл - 1 шт;
Этикетка-инструкция - 1 шт.
3. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (1000±5) мл - 1 шт;
Этикетка-инструкция - 1 шт.

Условия хранения и транспортирования

«Изолак» гипс-гипс» должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 98%. Условия транспортирования при температуре от -15 до +50°C и относительной влажности не более 98%.

Срок годности: 3 года.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолак» гипс-гипс» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Техническое обслуживание и ремонт

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов

Отходы при использовании изделия «Изолак» гипс-гипс» в виде остатков лака и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А. Неиспользованное изделие по истечении срока годности утилизируется согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06. www.celit.ru.