

FUSION FLO

Светоотверждаемый наногибридный жидкотекучий композит

**PREVEST DenPro®**
БУДУЩЕЕ СТОМАТОЛОГИИ

Описание продукта: Fusion Flo - первоклассный жидкий композит, обеспечивающий высокую прочность и износостойкость. Характеризуется оптимальным средством с поверхностями, проникает в самые сложные участки. Сочетает в себе высокие эстетические свойства, а также необходимую для использования текучесть.

Состав: Бисфенол А глицидил метакрилат, этоксилированный диметакрилат бисфенола А, диметакрилат уретана, диметакрилат триэтиленгликоля, порошок силанированного бариевого стекла, аморфная коллоидальная двуокись кремния, 70% общий неорганический наполнитель.

Показания: FUSION Flo предназначен для прямого пломбирования V класса (цервикальный кариес), лечения корневых эрозий, клиновидных дефектов. Пломбирование передних зубов (класс III и IV). Пломбирование боковых зубов (небольшие пломбы). Ремонт композитных и керамических виниров. Блокирование поднутрений. Адгезивное цементирование композитных и керамических реставраций.

Инструкция по применению: Уложить материал с помощью насадки на аппликатор непосредственно в полость и выполнить предварительное контурирование с помощью подходящего инструмента. Толщина слоя - не более 2 мм. Фотополимеризация в течение 40 секунд с использованием стандартного аппарата фотополимеризации.

Внимание: Избегать длительного или многократного контакта с кожей (аллергический контактный дерматит) и глазами. Избегать вдыхания в течение длительного времени. Не принимать внутрь. Контакт с кожей может вызвать раздражение, ожоги, гиперчувствительность. При попадании на кожу немедленно тщательно протереть пострадавший участок ватой и спиртом, а затем тщательно промыть водой с мылом. При возникновении кожной сыпи и сенсibilизации или других аллергических реакций прекратить использование и обратиться к врачу. При попадании продукта в глаза, тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Противопоказания: Не использовать для лечения пациентов с тяжелой аллергической реакцией на метилакрилатные смолы в анамнезе.

Меры предосторожности: Не использовать вместе с содержащими эвгенол материалами, поскольку они могут повлиять на полимеризацию и затруднить отверждение. Шприцы чувствительны к теплу и свету, беречь от прямых солнечных лучей.

Условия хранения: Хранить при температуре от 10 °С до 24 °С. Тщательно закрывать крышку после использования. Хранить в сухом месте. При хранении в сухом прохладном месте после вскрытия упаковки годен в течение указанного срока хранения.

Срок годности: 3 года от даты изготовления.

Упаковка:

Кат.№: 20008-1

Пробный набор: 1 шприц объемом 2 г + 5 канюль

Кат.№: 20008

Начальный набор: 2 шприца объемом 2 г + 10 канюль

Кат.№: 20009

Комбинированный набор: 4 шприца объемом 2г + 20 канюль.**Оттенки:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OA3.5, G1, G2, G3, G4, BL, Opaque, Incisal**Утилизация:** Утилизировать в соответствии с действующими правилами страны использования.

Prevest DenPro Limited Unit II, EPIP, Bari Brahmama, Jammu-181133, India. www.prevestdenpro.com Custome Care No.: 1800-180-7172 Email: customercare@prevestdenpro.com	EC REP Obelis s.a Boulevard General Wahis 53 1030Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732 59 54 Fax +(32) 2 732 60 03 E-mail: mail@obelis.net	 0123 Редакция : 05
	Дата : 23-05-2019	

Код партии
 Использовать до
 Не стерильно
 Беречь от влаги
 Осторожно!
 Обратитесь к руководству по эксплуатации
 Номер в каталоге
 Официальный представитель в ЕС
 Не применять при повреждении упаковки
 Беречь от детей
 Наименование и адрес изготовителя
 Ограничение температуры
 Не допускать попадания солнечного света

Материал разработан исключительно для профессионального использования в стоматологии. Применение должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией по применению. Ответственность за ущерб, возникший из-за несоблюдения предписанных условий применения, не принимается. Пользователь несет ответственность за проверку материала на его пригодность и использование в любых целях, явно не указанных в данной инструкции. Описание и данные не являются гарантией свойств и не носят обязывающий характер.

FUSION FLO Светоотверждаемый наногибридный жидкотекучий композит
 Материалы композитные стоматологические **FUSION** с принадлежностями.
 Комплектацию и оттенки смотри на упаковке
 Производитель: «Превест Денпро Лимитед», Индия, PREVEST DENPRO LIMITED, Export Promotion Industrial Park, (EPIP), Bari Brahmama, 181133 Jammu, India PY: № ФСЗ 2011/10852 от 27.02.2020 г. Срок годности указан на упаковке.
 Утилизировать в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченная организация для предъявления претензий на территории РФ: ООО СП «ХИРАТРЕЙД», тел.: +7(4922) 42-05-32, email: info@hiratrade.ru