

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
лака разделительного зуботехнического
«ИЗАЛЬГИН®»
по ТУ 9391-002-45814830-2003

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Лак разделительный зуботехнический «Изальгин» (далее по тексту - лак «Изальгин») предназначен для применения в стоматологической практике в качестве изоляционного материала при изготовлении пластмассовых протезов и гипсовых форм.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Лак «Изальгин» изготовлен на основе альгината натрия. Образуя пленку на поверхности гипсовой модели, лак «Изальгин» предотвращает сращивание гипса с пластмассой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Покрытие гипсовой формы лаком «Изальгин» проводят после того, как с поверхности гипса удален воск и модель (форма) хорошо обезжирена кипячением в воде. Необходимое количество лака «Изальгин» наливают в небольшой сосуд и кисточкой равномерно наносят его на еще теплую поверхность гипсовой модели. Пленка образуется за 1-5 минут в зависимости от температуры гипсовой модели, окружающей среды и применяемой струи воздуха для просушки. Если после нанесения слоя лака пленка не образуется, необходимо провести повторное обезжиривание обрабатываемой поверхности и повторить процедуру нанесения лака.

ВНИМАНИЕ: *НЕ СЛИВАТЬ использованный лак во флакон! НЕ ОПУСКАТЬ кисточку во флакон с лаком! Это приводит к порче всего материала.*

ФОРМА ВЫПУСКА

Лак (флакон)	- 5 мл или 125 мл или 500 мл или 1 л
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить при температуре от +5°C до +25°C, **избегать попадания прямых солнечных лучей.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

Срок годности - **3 года.**

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки лака «Изалгин» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02236 от 23.10.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.