

OptiDisc™



ОТСУТСТВИЕ
ВЫСТУПАЮЩЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

УКОРОЧЕННЫЙ ДИСКОДЕРЖАТЕЛЬ



ОПТИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ И НАЛИЧИЕ УКОРОЧЕННОГО ДИСКОДЕРЖАТЕЛЯ

идеальное решение для дистальной группы зубов
и труднодоступных областей

ОТСУТСТВИЕ ВЫСТУПАЮЩЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ

точная обработка без царапин на поверхности зубов
и реставрации, без повреждения мягких тканей

ПРОЗРАЧНОСТЬ ДИСКА

хороший обзор рабочего поля

ПОНЯТНАЯ ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

4 цвета – 4 степени абразивности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

цены ниже – упаковки больше!



OptiDisc General Assorted Kit 4200

9,6 мм, 12,6 мм набор (240 шт.)
 Ø 9,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
 Ø 12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
 5 дискодержателей (3 стандартных, 2 коротких); 1 OptiShine™



Евгения Александровна ДОРОФЕЕВА

Стоматолог-терапевт, главный врач студии «Браво» (г. Екатеринбург).
 Врач высшей категории, Врач-консультант компании Kerr.

«Особенности полировочной системы OptiDisc™, такие как укороченный дискодержатель и малый диаметр дисков (9,6 мм), решают проблему полировки в труднодоступных местах.»


ПОШАГОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ KERR ДЛЯ ФИНИРОВАНИЯ И ПОЛИРОВКИ

Kerr[™]

1

КОНТУРИРОВАНИЕ

Придание первоначальной геометрической формы

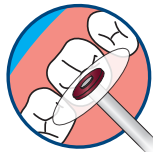

OptiDisc[™]
очень грубый

2

ФИНИРОВАНИЕ

Удаление излишков композита.
Придание формы окклюзионной анатомии,
лингвальных фиссур, вторичной анатомии.



OptiDisc[™]
средний


3

ПОЛИРОВКА

Устранение царапин



OptiDisc[™]
тонкий

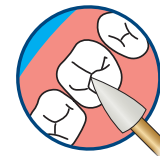

OptiStep^{™*}
*Абразивность регулируется
за счет нажатия


4

ПРИДАНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА

Снижение шероховатости поверхности
до показателя ниже, чем Ra = 0,2 мк,
придание блеска.



OptiDisc[™]
ультратонкий

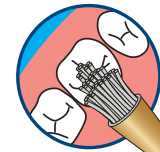

Occlubrush[™]/
OptiShine[™]

Список официальных дистрибьюторов представлен на сайте www.kerrdental.ru