

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора полирующих кальцинирующих паст для естественных зубов
"ПОЛИДЕНТ"
по ТУ 9391-030-45814830-98
«ПОЛИДЕНТ» № 4

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор полирующих кальцинирующих паст для естественных зубов «Полидент» состоит из:

- паста № 1 – для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали,
- паста № 2 – для удаления мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед реставрацией зубов,
- паста № 3 – для отбеливания, реминерализации и фторирования зубной эмали,
- **пасты № 4** (далее по тексту – пасты «Полидент» № 4) – **для предварительной и окончательной обработки пломб из композитных материалов, стеклоиномеров и амальгам.**

Пасты «Полидент» № 4 предназначены для предварительной и окончательной обработки пломб из композитных материалов, стеклоиномеров и амальгам, с целью придания им сухого блеска.

Пасты «Полидент» № 4 предназначены для применения в условиях медицинского учреждения.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Пасты «Полидент» № 4 содержат абразив, гидрофильный пастообразователь и инертный наполнитель.

Полировка пломбы выполняется отделочными головками пламевидной или чашевидной формы с применением паст «Полидент» № 4.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Борами с алмазными головками «РосБел» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа») удалить излишки пломбировочного материала.

Нанести на рабочую поверхность отделочной головки небольшое количество пасты «Полидент» № 4 для предварительной обработки (паста белого цвета) и обработать просушенную поверхность пломбы на средней скорости и при среднем давлении в течение 1 минуты. После обработки смыть пасту водой с поверхности пломбы и отделочной головки.

Для получения сухого блеска процедуру полировки необходимо повторить с использованием пасты «Полидент» № 4 для окончательной обработки (паста розового цвета) в течение 30-60 секунд.

ВНИМАНИЕ: Заключительный этап обработки (последние 15-20 секунд) рекомендуется проводить отделочной головкой при отсутствии избытка полировальной пасты на поверхности пломбы. При этом, достижение сухого блеска пломбы происходит за счёт воздействия остаточных количеств полировальной пасты.

В обоих случаях процедуру полировки проводят без добавления воды.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускаются отдельно:

Паста для предварительной обработки (шприц или туба)	- 2 шт. х 3 г или 90,0 г
Паста для окончательной обработки (шприц или туба)	- 2 шт. х 3 г или 90,0 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Выпускаются набором:

Паста для предварительной обработки (шприц)	- 3 г
Паста для окончательной обработки (шприц)	- 3 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск паст «Полидент» № 4 в виде отдельных изделий или другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от **+5°C до +25°C**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°C до +30°C**.

Срок годности - **3 года**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки паст «Полидент» № 4 и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03037 от 19.12.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.